

COLETE DE CORPO

I) IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

CC100

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE ANATÔMICA

USO ADULTO

TAMANHO: DO TAMANHO PP A TAMANHO ESPECIAIS

| TAMANHO | MANEQUIM | TRONCO |
|---------------------------|----------|--------|
| PP | 36 - 42 | CURTO |
| P | 36 - 42 | MEDIO |
| M | 42-44 | LONGO |
| G (Sob encomenda) | | |
| GG (Sob encomenda) | | |
| 2GG (Sob Encomenda) | | |
| Especiais (Sob encomenda) | | |

II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1 . O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESSE PRODUTO

Apesar de muito estudo no desenvolvimento dos desenhos dos Coletes, entendemos que existe uma variação grande com relação aos biotipos.

Nossos produtos não são feitos sob medida, portanto se fizer necessário devem ser feitos ajustes e/ou complementos.

Em qualquer lugar que fosse o fechamento do Colete teríamos uma descontinuidade de pressão, então em casos de muito edema na região dorsal sugerimos complementar a compressão com a tala dorsal.

Em casos de tronco longo, baixo peso e baixas circunferências sugerimos avaliar se a sobreposição da espuma vai trazer desconforto. Se isso acontecer é necessário fazer ajustes.

Em casos de tronco mais curto e circunferências maiores é necessário optar por um tamanho menor e complementar com a tala dorsal caso tenha necessidade de compressão na região lombosacra.

Tratamos nossos produtos como “remédio”, portanto para sua segurança consulte seu médico se você pode usar.

Já é sabido e descrito em livros e artigos científicos que no tratamento do linfo edema se faz necessário uma boa contenção.

Na cirurgia plástica além do sistema linfático temos outros tecidos envolvidos como a derme, epiderme e hipoderme, nervos periféricos, fásia dentre outros.

Devido a esse acometimento em tecidos com características de cicatrização diferentes quando, principalmente ao sentar as cintas dobram, esse fato pode trazer prejuízos nos outros tecidos se usada individualmente na fase inicial em grandes cirurgias no tronco.

O colete de corpo se propõe em fazer uma compressão eficiente do sistema linfático além de preservar a regularidade na compressão dos outros tecidos e evitando garrotes no sistema linfático.

2 . PARA QUE O COLETE É INDICADO

O colete de corpo se destina a todos os pacientes que fizeram cirurgia plástica no tronco e tem como objetivo prevenir irregularidades e aumentar a compressão no tronco.

2.1. Para garantir estabilidade dos tecidos operados.

2.2. Para prevenir irregularidades.

2.3. Para oferecer compressão regular e eficiente em toda a área operada favorecendo a absorção dos líquidos e impedindo o seu extravasamento de dentro dos vasos

3. COMO O COLETE FUNCIONA

O Colete faz uma compressão regular e eficiente em toda área operada favorecendo a absorção dos líquidos e impedindo o seu extravasamento de dentro dos vasos.

Não deformam na sua estrutura.

4. QUANDO NÃO DEVO USAR

4.1. Não deve ser usada sem indicação médica.

4.2. Em casos raros ela pode incomodar. Nesse caso consulte seu médico se deve continuar usando mesmo assim.

4.3. Quando houver suspeita que ela não esteja cumprindo o papel.

4.4. Quando tiver diagnóstico de alergia.

5. POR QUANTO TEMPO POSSO USAR ESSE PRODUTO?

No geral existe uma variação entre 1 mês a 6 meses, mas quem é capaz de definir isso é o profissional responsável por você pois ele seguirá critérios individuais com relação ao seu quadro clínico.

6. COMO DEVO USAR ESSE PRODUTO

6.1. Consulte seu médico.

6.2. Sugerimos encaixar o colete nas axilas e começar a fechar na parte superior e sem fazer fortes trações ir acomodando e fechando.

6.3. Se não for colocado da forma correta ele pode dobrar e além de incomodar pode atrapalhar o processo.

6.4. Evite comprimir áreas de enxertia glútea com a espuma nessa região sugerimos apenas a compressão da malha.

7. ORIENTAÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

7.1. Não lavar em máquina ou secadora

7.2. Não passar

7.3. Usar sabão neutro

7.4. Não deixar de molho

7.5. Não torcer apenas apertar para drenar o excesso de água que acumula na lavagem